



# STÉRILISATEURS

DENTAIRES



# Réduire le stress et améliorer la rétention



Le traitement des instruments est une tâche strictement réglementée qui demande beaucoup de temps et de travail et peut devenir l'un des principaux contributeurs au stress et à l'épuisement professionnel des collègues. C'est pourquoi nous avons conçu **les stérilisateurs à vapeur Midmark<sup>MD</sup>** pour faciliter et automatiser autant que possible le traitement des instruments dans le respect des pratiques cliniques exemplaires.



# Stérilisateurs à vapeur Midmark<sup>MD</sup>

**SIMPLIFIEZ LA STÉRILISATION POUR QUE VOTRE ÉQUIPE PUISSE FAIRE LE TRAVAIL QU'ELLE AIME. CHOISISSEZ UNE TECHNOLOGIE CONÇUE POUR LEUR BIEN-ÊTRE.**

Les stérilisateurs à vapeur Midmark sont conçus de manière à présenter à l'écran des conseils intuitifs, des notifications utiles et des invites tactiles étape par étape qui permettent de simplifier les efforts de conformité, le déroulement des cycles et les soins de routine. Gagnez du temps, simplifiez la formation de vos collègues et renforcez la confiance dans le traitement des instruments grâce à la surveillance mécanique automatisée et aux rapports sur les indicateurs chimiques.

## INTERFACE UTILISATEUR

**INTUITIVE :** Naviguez dans la configuration du cycle et d'autres processus dans votre langue préférée (anglais, français ou espagnol) sur un écran tactile de 12,7 cm (5 po), clair, résistant aux empreintes de doigts et compatible avec l'usage de gants. Choisissez un affichage clair ou sombre.



**BALAYEZ LE CODE  
POUR VOIR LA VIDÉO.**



**PROTÉGEZ VOTRE  
INVESTISSEMENT**

Enregistrez votre garantie dès aujourd'hui à l'adresse [midmark.com/protectyourinvestment](https://midmark.com/protectyourinvestment) pour bénéficier d'une assistance rapide en cas de besoin et inscrivez-vous pour être informé des futures mises à jour logicielles.



01



02



### 01 STÉRILISATEUR À VAPEUR MIDMARK M11®

La chambre de 11 x 18 po fait du modèle M11 l'un des plus grands stérilisateurs de comptoir standard du marché.

### 02 STÉRILISATEUR À VAPEUR MIDMARK M9®

Disposez de toute la puissance de stérilisation fiable dont vous avez besoin grâce à un appareil compact parfait pour un espace réduit.

Les stérilisateurs Midmark sont conçus pour rendre le traitement des instruments aussi simple et automatisé que possible.



**EMBALLÉ**  
270°F, 4 MIN



**EMBALLÉ**  
275°F, 3 MIN



**DÉLICAT**  
250°F, 30 MIN




**DÉBALLÉ**  
270°F, 3 MIN




**5 CYCLES  
PERSONNALISÉS\***  
250°F - 275°F, 3 À 45 MIN

Simplifiez le flux de travail clinique grâce aux stérilisateurs à vapeur à évacuation dynamique de l'air qui disposent de cycles préétablis uniques répondant aux recommandations du CDC et de l'AAMI pour les cycles de stérilisation des instruments emballés<sup>1</sup>.


Suivez à distance l'état du cycle (cycle en cours, cycle terminé et erreur de cycle) grâce à une barre lumineuse DEL à code couleur évolutif, un minuteur de grande taille et des signaux sonores.

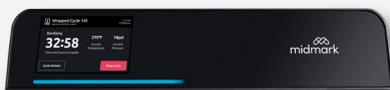

**CYCLE EN COURS**

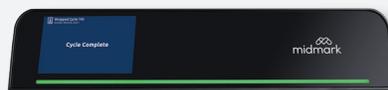

**CYCLE TERMINÉ**

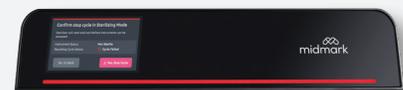

**ERREUR DE CYCLE**

\* Les cycles personnalisés ne sont pas approuvés par la FDA et la validation de la stérilité des instruments traités à l'aide d'un cycle personnalisé est de la responsabilité de l'utilisateur.



### SUIVI SIMPLIFIÉ DE LA CONFORMITÉ :

Les rappels et notifications de l'appareil, l'authentification des utilisateurs, le stockage illimité des événements d'entretien régulier pendant toute la durée de vie du stérilisateur, ainsi que l'enregistrement automatisé du déroulement des cycles assurent votre préparation constante pour toute vérification.



BALAYEZ LE CODE  
POUR VOIR LA VIDÉO.



**DURABILITÉ :** Les stérilisateurs Midmark ont été conçus pour durer et offrent une durée de cycle plus longue de 25 000 cycles grâce à une chambre entièrement repensée. Cette durabilité améliorée réduit de plus de moitié la maintenance nécessaire par les utilisateurs et les techniciens certifiés.



BALAYEZ LE CODE  
POUR VOIR LA VIDÉO.



# ACCESSOIRES



**9A307001 – OUTIL À MAIN FROID**  
(pour plateaux et cassettes)



**9A694001 – REMPLISSAGE AUTOMATIQUE 115 V** (9A694002 – Remplissage automatique 230 V disponible)



**9A698001 – TROUSSE USB**  
Téléchargez les données des cycles, y compris la durée, la température et la pression. Comprend une clé USB, un câble USB et une carte PC (installation par un technicien requise).



**9A703001 – SUPPORT DE CASSETTES VERTICAL** (modèles de stérilisateur à vapeur M11 uniquement)



**9A586002 – SYSTÈME DIRECT-TO-DRAIN DOUBLE VISTACOO™**

# ENTRETIEN ET SOUTIEN

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Consultez les spécifications techniques des stérilisateurs à vapeur Midmark M9<sup>MD</sup> et M11<sup>MD</sup>.



**BALAYEZ LE CODE POUR VOIR LES SPÉCIFICATIONS.**

## CONCEPTION EN DIRECT DE MIDMARK

Nos experts en conception sont prêts à vous accompagner à chaque étape du processus.



**BALAYEZ LE CODE POUR VOIR LA VIDÉO.**

# SOURCES

1 FDA - <https://www.fda.gov/media/80265/download>



Designing better care.®



Conforme à la norme CARB 93120.2 Phase 2 et à la norme TSCA Titre VI

Les exemples de couleurs présentés illustrent au mieux le matériau original. La couleur réelle peut varier légèrement. Nous vous recommandons fortement de communiquer avec l'équipe de l'expérience client de Midmark au 1 800-MIDMARK pour demander un échantillon avant de passer votre commande.

Midmark est une entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001. Certains produits ne sont pas certifiés. Consultez la liste complète sur [midmark.com/ISO](http://midmark.com/ISO).

Pour plus de renseignements, communiquez avec votre distributeur Midmark ou appelez le 1 800-MIDMARK.

Pour les appels hors des États-Unis, composez le 1 937 526-3662 ou visitez notre site Web [midmark.com](http://midmark.com).

© 2025 Midmark Corporation, Versailles, Ohio, États-Unis  
Les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.  
Imprimé aux États-Unis.

007-10489-02 Rev. B1 (3/25)

